

Marken Name : Diamond Medical

---

Produkt Typ: Medizinische Gesichtsmaske, 3-lagig

---

Klassifizierung : Type IIR

---

Produkt Code: DM2020180

---

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Verwendungszweck: Medizinische Einwegmaske, geeignet für Arbeiter im medizinischen Bereich.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Lagerung :

1. Lagern Sie das Produkt in einer sauberen, trockenen Umgebung, abseits von kontaminierten und feuchten Orten.

2. Beim Transport sollten die Produkte geschützt werden vor Aufprall und Druck, versuchen Sie Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.

Benutzeranleitung:

1. Öffnen Sie das Paket, drehen sie eine Maske mit der Bügelseite nach oben und benutzen Sie die Bänder zu beiden Seiten der Maske, um sie hinter Ihren Ohren zu befestigen.

2. Drücken Sie den Bügel am oberen Ende der Maske mit 2 Fingern auf Ihr Nasenbein, um es zu festigen und ziehen Sie dann das untere Ende der Maske bis unter Ihr Kinn.

3. Passen Sie die Maske so an, dass Sie den gesamten Bereich von Nase bis Kinn bedeckt, um den bestmöglichen Schutz zu garantieren.

Warnhinweise :

1. Das Produkt ist nur für eine einmalige Nutzung geeignet und kann nicht mehrmals verwendet werden.

2. Das Produkt sollte nicht nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums benutzt werden, da es schimmeln oder vergilben kann oder durch äußere Einwirkung auf die Verpackung oder durch Verschmutzung beschädigt werden kann.

3. Das Produkt sollte trocken und vor Feuer und Feuchtigkeit geschützt gelagert werden.

Entsorgung:

Berühren Sie nie die Vorderseite des Produkts, wenn Sie es abnehmen. Dies kann dazu führen, dass Hände kontaminiert und die Maske während des Tragens von viralen Partikeln besetzt wird. Alle aufgeführten Produkte sind nur zur einmaligen Nutzung geeignet und sollten nach dem Tragen sofort entsorgt werden. Teilen Sie sich nie ein Produkt mit einer anderen Person, da womöglich ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht.

Waschen sie Ihre Hände! Nach jeder Abnahme eines Gesichtsschutzes sollten Sie Ihre Hände gründlich waschen.

Hersteller: Hubei Wanli Protective Products Co.,Ltd.

Produktions Adresse: Tangwan Street, Xiliuhe Town, Xiantao, Hubei, China

Telefon Hersteller: 0728-3227299, Distributor: De Boer Dental, the Netherlands, [www.deboerdental.nl](http://www.deboerdental.nl)

---